



Best.-Nr.: 377 251
EAN: 4013207377253

Produkt-Bezeichnung:

EKASTU-Augenspülflasche MINI mit Trichter, (für 200 ml) EY

Die EKASTU Augenspülflaschen/-einrichtungen werden gemäß Werksvorgaben hergestellt.



BESCHREIBUNG

Die ersten Sekunden nach einem Unfall, bei dem die Augen gefährlichen Substanzen ausgesetzt waren, sind entscheidend, um die Verletzung möglichst gering zu halten. Augenduschen ohne Wasseranschluss (Augenspülflaschen) sind konstruiert und vorgesehen, um in unmittelbarer Nähe von Personen in potenziell gefährlichen Arbeitsbereichen gehalten zu werden. Die Hauptaufgabe dieser Geräte ist die Erste-Hilfe-Versorgung

HAUPTEIGENSCHAFTEN

Trichterdeckel

Trichter

Anschlussstück
mit Kippventil
und Steigrohr

Augenspülflasche
(ca. 200 ml.)



PIKTOGRAMM-DEFINITION

• Informationsbroschüre beachten



• Ersetzt das Wort „Artikelnummer“



• Chargenbezeichnung



• Pharmazentralnummer



• Hersteller



GEWICHT

• ca.: 66 g

MATERIALIEN

Die verwendeten Werkstoffe sind hautverträglich und haben deshalb keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit

- | | | | |
|-------------------|--|-------------------|------------------------------------|
| • Flasche: | Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) | • Anschlussstück: | Polystyrol (PS) |
| • Trichter: | Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE) | • Kippventil: | Polyamid (PA) |
| • Trichterdeckel: | Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) | • Steigrohr: | Polyvinylchlorid Weich (PVC-Weich) |

KENNZEICHNUNG

- Markenzeichen des Herstellers (LOGO)
- Hersteller/-adresse
- Produkt-Bezeichnung/Artikelnummer
- Informationsbroschüre des Herstellers beachten
- LOT-Nr.
- PZN-Nr.

< 5B8 < 56I B;

- Platzieren sie die leere Augenspülflasche an zentraler Stelle, am besten direkt an einer Wasserentnahmestelle
- Kommt es zu einem Augenunfall, muss die Flasche umgehend mit handwarmem Leitungswasser befüllt werden
- Gemäß Informationsbroschüre des Herstellers einsetzen

VERWENDERHINWEISE

Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Benutzen Sie die Augenspülflasche ausschließlich gemäß der Informationsbroschüre, den jeweils geltenden gesetzlichen Regeln und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften z.B. DGUV Information 204-022 „Erste Hilfe im Betrieb“.

TD 377 251_01-05.25